



VaPro

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar



Guía de uso



 **Hollister**

**Primero las personas:
Denise Miller**

“La diferencia es como la noche y el día”, dice Denise. Su nuevo producto le ha abierto la puerta a deleitarse redescubriendo lo grandioso de palpar el aire libre

Gracias a su diseño exclusivo y a sus características excepcionales, la sonda hidrofílica intermitente **VaPro** brinda a los usuarios una sensación de seguridad, comodidad y bienestar.



VaPro

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar

Puede estar tranquilo de que esta sonda intermitente, recomendada por su médico, tiene las características que le permitirán cateterizarse fácil y cómodamente

Prehidratado y listo para usar


La tecnología de hidratación de catéter puro significa que el catéter está totalmente lubricado, liso, y listo para utilizarse al sacarlo del paquete permitiendo un cateterismo sin contacto

1 Funda protectora

facilita la manipulación, al tiempo que ayuda a mantener fuera las bacterias, y permite sostener y utilizar la sonda con facilidad

2 Punta protectora

ayuda a reducir el riesgo de introducción de bacterias en el interior del sistema urinario

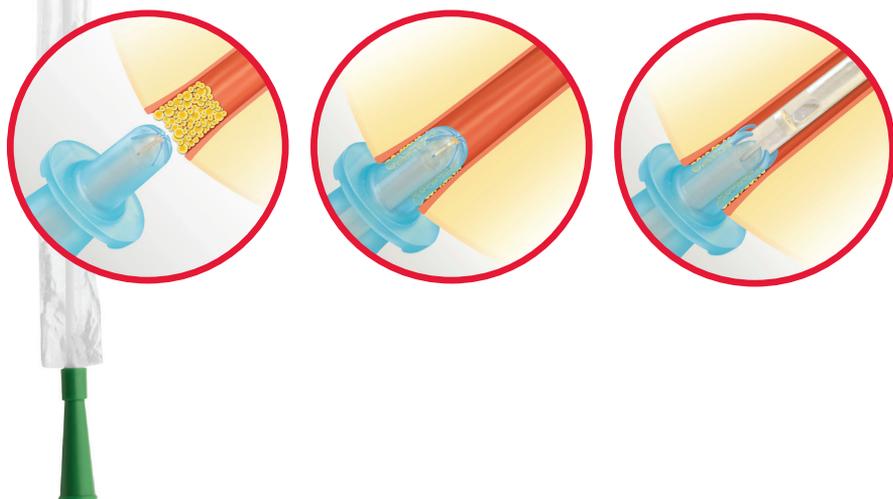

VaPro Plus

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar

Una gran opción para los que prefieren la comodidad de una bolsa de recolección

3 Bolsa de recolección integrada

Cateterice en el mismo procedimiento, sin necesidad de contar con recipientes

El catéter ubicado fuera de la bolsa de recolección brinda comodidad en el manejo

El mismo catéter VaPro, el mismo reembolso
Se utiliza el mismo enfoque en la capacitación para las dos opciones de catéter







VaPro / VaPro Plus

Sonda hidrofílica intermitente con sistema No Tocar


Cómo funciona el sistema urinario

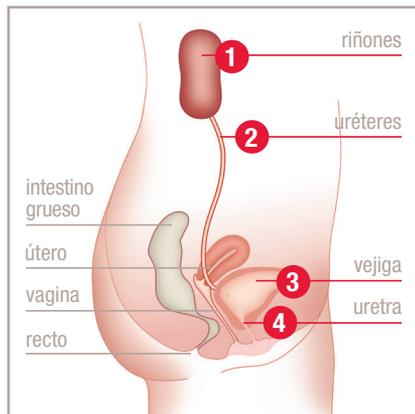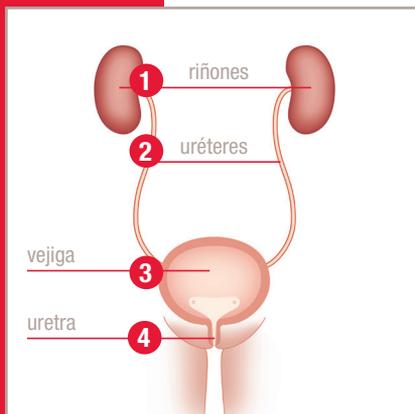


- 1 La orina es producida por los riñones, los cuales filtran los productos de desecho fuera de su organismo.
- 2 Los desechos líquidos pasan por tubos llamados uréteres hasta la vejiga, órgano que almacena la orina.
- 3 Cuando la vejiga se llena, se envía una señal al cerebro para indicarle al músculo del esfínter de la uretra que se relaje y a la vejiga que se contraiga.
- 4 La orina fluye por la uretra, tubo natural por el que sale la orina desde la vejiga y fuera del cuerpo.

Autosondaje uretral intermitente (AUI)

Cuando la vejiga no se vacía sola, podría recomendarse el AUI. El autosondaje se debe realizar bajo asesoramiento médico y únicamente de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan. Implica utilizar una sonda para drenar la orina de su vejiga por la uretra. La orina debe expulsarse regularmente a lo largo del día para mantener el cuerpo saludable.

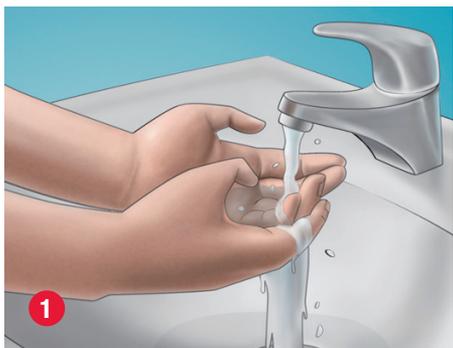

Lávese las manos con un jabón neutro y agua.

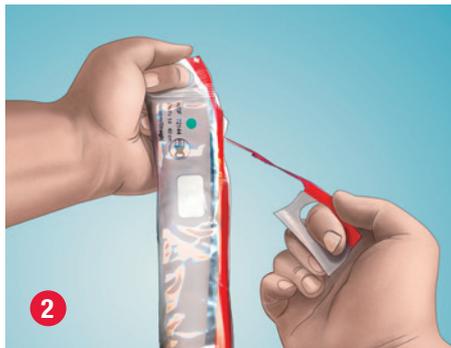

Para abrir el envase de la sonda, tire hacia usted del orificio para introducir el dedo, en la parte superior, al menos hasta mitad del camino hacia la parte inferior del envase. Si es necesario, utilice la cinta adhesiva que está sobre el envase de la sonda para adherirla a una superficie mientras se prepara para la colocación de la sonda.



Saque la sonda del envase. Deje la sonda sobre el envase abierto.



VaPro Plus solamente
Para quitar la bolsa de recogida, tire de la banda de papel hacia la sonda y en dirección contraria a la bolsa para retirarla, o bien coloque la sonda en una superficie plana y, con la parte inferior del puño, despegue la bolsa de la sonda para liberar la banda de papel. Coloque la sonda en el paquete abierto.



5
Separe los labios de la vagina y limpie el meato urinario con un jabón neutro sin perfume, o con una toallita húmeda sin alcohol.



6
Retire el tapón rojo de la punta protectora de la sonda.



VaPro solamente
7
Dirija la vía de drenaje de la sonda hacia un receptáculo adecuado o un inodoro.




8
Sujete la sonda con una mano, y con la otra hágala avanzar hasta que la punta de la sonda alcance la punta protectora, teniendo la precaución de que la sonda no sobresalga.



9
Separe los labios de la vagina con los dedos. Coja la sonda por debajo de la base de la punta protectora, e inserte la punta protectora hasta que la base esté en contacto con el meato urinario. Libere los labios, manteniendo la punta protectora en esa posición. Introduzca la sonda empujándola hacia delante hasta que la orina empiece a fluir. Una vez que la orina deje de fluir, retire suavemente la sonda para asegurarse de que haya vaciado completamente la vejiga. Saque la sonda suavemente hasta su completa retirada.



VaPro Plus solamente
10
Para vaciar la bolsa de recogida antes de desecharla, rásguela a la altura de la flecha (con la inscripción "Tear here to empty") para drenar la orina.

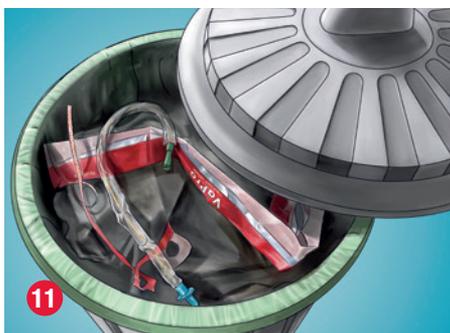

11
Puede desechar la sonda en una papelera. No la tire en el inodoro.



12
Lávese las manos con un jabón neutro y agua.

