

Adapt Pâte

Accessoire



- La pâte sert à combler les irrégularités autour de la stomie et à créer un joint d'étanchéité afin de prévenir les fuites.¹

Comment l'utiliser ?

1. Appliquez la pâte autour de la stomie sur une peau sèche et propre
2. Si besoin étalez la pâte avec le doigt préalablement mouillé
3. Attendez quelques instants et placez l'appareillage comme d'habitude
4. Rebouchez soigneusement le tube après usage



Questions fréquemment posées

Où dois-je appliquer la pâte ?	Soit sur le protecteur cutané autour de la découpe centrale, soit directement sur la peau autour de la stomie afin de combler les irrégularités.
Pourquoi ai-je une sensation de picotements lorsque j'applique la pâte ?	Les pâtes pour stomie contiennent de l'alcool en petite quantité afin d'augmenter leur résistance aux matières et aux liquides. Cette sensation est passagère et s'estompe très vite.
Quels sont les risques si la pâte entre en contact avec ma stomie ?	Cette pâte a été conçue pour les stomies. Elle n'est donc pas nocive et il n'y a pas de risque d'obstruction de la stomie.
Il reste quelques résidus de pâte sur ma peau, comment faire pour les enlever ?	Vous pouvez retirer la pâte lors de votre soin avec de l'eau et du savon neutre (type savon de Marseille). S'il reste quelques traces, ne frottez pas, les résidus partiront au retrait du prochain appareillage. Vous pouvez aussi utiliser une lingette pour retrait d'adhésif Adapt.
La pâte permet-elle à ma poche de mieux adhérer ?	La pâte sert de joint. Elle prévient les risques de fuite entre le protecteur cutané et votre peau mais ce n'est pas un adhésif.
Comment puis-je conserver la pâte ?	Afin de conserver l'efficacité optimale de la pâte, il est important de veiller à refermer le tube rapidement après chaque utilisation.



Produit	Référence	ACL 13
Adapt Pâte 1 tube de 60 g	79300	3401077765316

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel gratuits

assistance.conseil@hollister.com

1. Notice d'instruction de la pâte Adapt : Ce produit est un accessoire pour un appareillage de stomie destiné à améliorer l'ajustement d'un produit de stomie à la peau et à prévenir les fuites de substances éliminées par la stomie sous le protecteur cutané.

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

Dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I, fabriqués par Hollister Incorporated. Ces dispositifs portent le marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : nov 2017. Référence : FR0194

