

Adapt Poudre

Accessoire



Comment l'utiliser ?

A chaque changement d'appareillage :

1. Saupoudrer la peau, parfaitement propre, autour de la stomie.
2. Retirer délicatement l'excès de poudre avec de l'essuie-tout, une compresse ou autre.
3. Mettre l'appareillage en place comme d'habitude.

Questions fréquemment posées

J'utilise des anneaux. Puis-je aussi utiliser la poudre ?	La poudre Adapt peut parfaitement être utilisée avec d'autres accessoires sans gêner leur utilisation.
Quelle quantité dois-je appliquer ?	Il suffit de couvrir la zone à traiter et enlever le surplus de poudre de façon qu'il n'en reste qu'une fine pellicule.
Dois-je en mettre sur le protecteur cutané ?	Non, la poudre s'applique directement sur la peau.
Dois-je mettre de la poudre systématiquement à chaque changement d'appareillage ?	La poudre s'utilise à chaque changement d'appareillage tant que la peau est suintante. Référez-vous aux conseils de votre soignant(e).



Produit	Référence	ACL 13
Adapt poudre Flacon de 28,30 g	7906	3401047474118

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

0 800 47 92 67 Service & appel gratuits

assistance.conseil@hollister.com

Hollister France
Tour Franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex

www.hollister.fr

La poudre Adapt est un dispositif médical de stomathérapie de Classe I. Fabriqué par Hollister Incorporated. Ce dispositif médical porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. A conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur (maximum 30°C) et de l'humidité, dans son emballage d'origine. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Hollister et son logo, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. Edition : oct 2017. Référence: FRO201

