



Changer un système

1 pièce

Matériel nécessaire



Retirer la poche usagée



Nettoyer et sécher la peau



Inspecter la peau et l'aspect de la peau



Mesurer la stomie



Tracer le contour de la stomie sur le protecteur cutané



Découper le protecteur cutané



Retirer le film protecteur



Fermer la poche




Robinet de vidange
d'une poche d'urostomie



Clamp
d'une poche vidable

Appliquer de la pâte ou un anneau protecteur si nécessaire

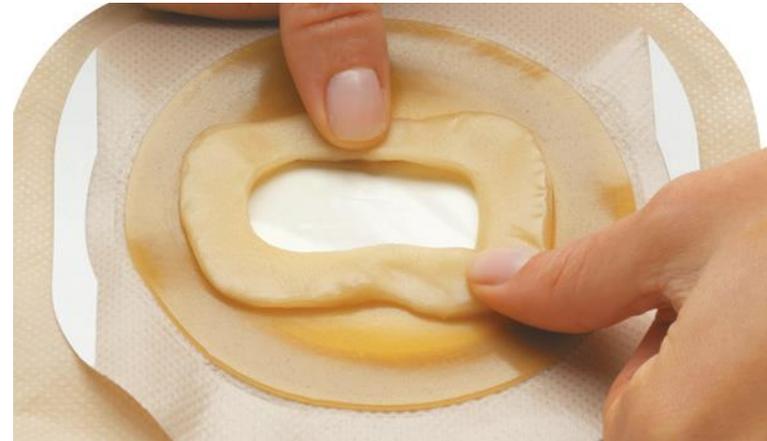

Mettre en place la poche (du bas vers le haut)



Merci

Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Moderma Flex, Conform 2, Adapt sont des dispositifs médicaux de stomathérapie de Classe I fabriqués par Hollister Incorporated. Attention, lire attentivement la notice d'instructions et/ou les étiquetages. Ces dispositifs sont pris en charge par l'assurance maladie. Hollister et son logo, Moderma Flex, Conform 2, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. ©2020 Hollister Incorporated. RCS Nanterre 402 202 733. Édition : Octobre 2020

