

# Infyna

## Gebrauchsanweisung

Das Hollister Logo und Infyna sind Warenzeichen von Hollister Incorporated.

©2017 Hollister Incorporated



Reinigen Sie die Hände gemäss den Instruktionen Ihres Gesundheitsinstitutes.


Reinigen und desinfizieren Sie den Harnröhreneingang gemäss den Instruktionen Ihres Gesundheitsinstitutes.



Öffnen Sie die Verpackung und greifen Sie den Katheter am Ableitungstrichter.



Spreizen Sie die Schamlippen. Schieben Sie den Katheter in die Harnröhre bis der Urin zu fließen beginnt. Nach Ende des Urinflusses ziehen Sie den Katheter langsam zurück und entfernen ihn vollständig.

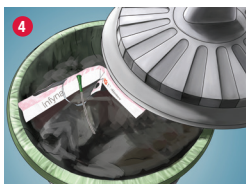

Entsorgen Sie den Katheter fachgerecht.  
Reinigen Sie sich die Hände.

# Infyna

Mode d'emploi




Nettoyez vos mains avant d'effectuer l'autosondage, comme enseigné par les soignants de votre institution. Nettoyez le méat urinaire à l'eau et au savon ou avec une lingette humide, ou avec du désinfectant comme enseigné par votre équipe soignante.



Ouvrez l'emballage en tirant doucement vers le bas sur le fil d'ouverture.



Ecartez les lèvres, insérez la gaine protectrice au niveau du méat urinaire, puis faites progresser la sonde dans l'urètre jusqu'à la vessie. (vous saurez que vous êtes dans la vessie quand l'urine commencera à s'écouler). Une fois terminé, retirez doucement la sonde pour s'assurer que la vessie est vidée.

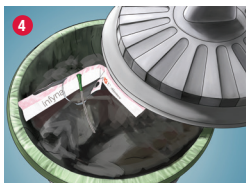

Jetez la sonde dans un endroit approprié.  
Lavez-vous les mains.

Hollister  
Bernstrasse 388  
8953 Dietikon  
044 730 45 05  
info@hollister.ch  
www.hollister.ch