

Informations Générales

- Une poche vidable est munie d'un clamp qui permet d'ouvrir la poche, de vider les effluents et de fermer la poche.
- Une poche vidable doit être vidée lorsque sa capacité atteint 1/3 à 1/2 d'effluents.
- Lock 'n Roll est le nom du clamp intégré des poches vidables 1 pièce **Moderma Flex** et des systèmes 2 pièces **Conform 2 Hollister**.





Comment l'utiliser ?

Placez la poche avec la face où se trouve le support vers votre abdomen.

• Fermeture de la poche

- 1 **Enroulez** le clamp 3 fois vers le haut.
- 2 **Placez** le rabat transparent.
- 3 **Pressez** du centre vers les extrémités.
Le clamp est verrouillé une fois que vous avez senti les villosités auto-agrippantes s'imbriquer les unes dans les autres.

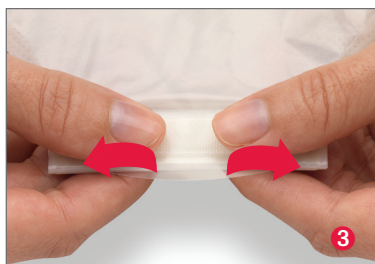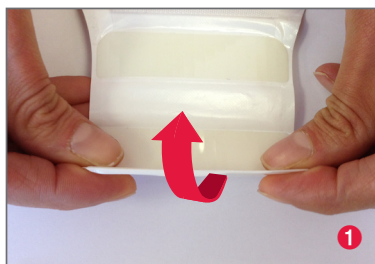

• Ouverture et vidange de la poche

- 1 **Soulevez** le rabat transparent vers le haut.
- 2 **Sécurité supplémentaire** : contrôlez l'ouverture et la vidange en dépliant le clamp d'abord 2 fois.
Les barrettes incurvées gardent le clamp fermé et résistent au poids des effluents.
- 3 **Déroulez** la dernière partie du clamp.
- 4 **Pressez** les barrettes vers l'intérieur pour contrôler le débit de la vidange.
- 5 **Nettoyez et séchez** le clamp à l'aide de papier toilette, d'un mouchoir ou d'une compresse.
Fermez le clamp.

