

## Avant les soins, préparez tout le matériel nécessaire :

- Nouvel appareillage (poche, support)
- Produits nécessaires à la toilette :  
eau du robinet, savon de Marseille
- Compresse ou essuie-tout
- Stomimètre/gabarit
- Stylo
- Ciseaux
- Sachet pour la poche usagée

## Découpe du matériel

1. Reproduisez le gabarit ou le stomimètre sur le support.
2. Découpez soigneusement à l'extérieur de la ligne tracée. **Attention à ne pas perforer la poche.** Lissez la découpe avec le doigt.



### ystème 1 pièce (le support et la poche forment 1 élément)



1.



2.

### ystème 2 pièces à emboîtement (le support et la poche forment 2 éléments)



1.



2.

### ystème 2 pièces adhésif



1.



2.

### Conseils et remarques :

---

---

---

---

---

---

---

---

**Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec votre infirmier(e) référent(e).**

Hollister met à votre disposition une ligne et une adresse email spécialement dédiées à vos remarques et suggestions concernant ce produit.

**0 800 479 267** Service & appel gratuits

ou par internet à [assistance.conseil@hollister.com](mailto:assistance.conseil@hollister.com)



**Hollister**  
Hollister France  
Tour Franklin  
100/101 Terrasse  
Boieldieu  
92042 Paris La Défense  
[www.hollister.fr](http://www.hollister.fr)

Pouchkins système 1 pièce, système 2 pièces à emboîtement et système 2 pièces adhésif, sont des dispositifs médicaux de stomathérapie de classe I fabriqués par Hollister Incorporated. Ce sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ils s'utilisent sur ordonnance et selon les conseils de votre médecin, pharmacien ou autre professionnel de santé compétent. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage avant utilisation. Hollister et son logo et Pouchkins, sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. RCS Nanterre 402 202 733. FR0078 - Décembre 2013 Version internet 2017

© BROW / A. P. 2013





Expliquez au bébé ce que l'on va faire. Maintenez la peau d'une main et décollez le protecteur cutané ou le support du haut vers le bas avec l'autre main. Vous pouvez vous aider d'une compresse mouillée.

## systeme 1 pièce

(le support et la poche forment 1 élément)



## systeme 2 pièces à emboîtement

(le support et la poche forment 2 éléments)



## systeme 2 pièces adhésif

(le support et la poche forment 2 éléments)



**Retirez l'appareillage en maintenant la peau avec les doigts**

Nettoyez la peau et la stomie avec une compresse non tissée imbibée d'eau. Séchez en tamponnant.



Vérifiez et adaptez régulièrement le diamètre de la stomie à l'aide du gabarit ou du stomimètre.

## Les conseils de la stomathérapeute

- Installez-vous confortablement sur une table à langer ou sur un lit.
- Détournez l'attention de l'enfant pendant le soin avec un doudou, un jouet, une sucette, un biberon, et en lui parlant.
- La peau autour de la stomie doit être saine. Si la peau est irritée, contactez votre stomathérapeute.
- Attention à ne pas plier la poche en mettant la couche, afin que les selles et/ou urines s'écoulent bien à l'intérieur.
- Pour les tout petits : chantez ou racontez une histoire.
- N'utilisez pas de savon, crème protectrice, lingette bébé, talc ou autres lotions qui laissent une pellicule grasse sur la peau et peuvent être allergisants.
- Vous pouvez utiliser les autocollants présents à l'intérieur des boîtes pour noter la date du prochain changement de poche.



## Systeme 1 pièce : changement tous les jours.



- Chauffez le support entre vos mains et retirez le film protecteur de la poche.




- Positionnez l'appareillage en faisant correspondre le bas de la découpe avec le bas de la stomie.



- Lissez avec le doigt en commençant au plus proche de la stomie et maintenez l'appareillage quelques secondes.

## Systeme 2 pièces à emboîtement : changement du support tous les 2-3 jours et de la poche tous les jours<sup>1</sup>.

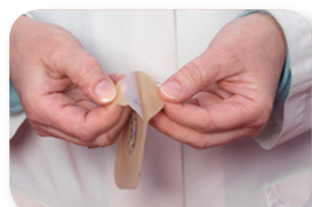

- Chauffez le support entre vos mains et retirez le film protecteur du support.



- Positionnez le support en faisant correspondre le bas de la découpe avec le bas de la stomie.



- Emboîtez la poche sur le support du bas vers le haut en glissant vos doigts sous l'anneau flottant pour ne pas appuyer sur l'abdomen de bébé.



- N'oubliez pas de fermer le clamp pour une poche vidable ou le bouchon pour une poche vidangeable.

## Systeme 2 pièces adhésif : changement tous les jours<sup>1</sup>.



- Retirez le film protecteur de la poche.



- Collez la poche sur le support en centrant les 2 éléments.
- Maintenez la poche et le support ensemble quelques secondes.



- Retirez le film protecteur du support.
- Pliez le support en deux en positionnant le bas de la découpe avec le bas de la stomie et lissez avec le doigt.

## MEMO :

---



---



---



---



---



---



---



---



Le doudou «Shadow Buddies». Un outil pédagogique pour accompagner les parents et les enfants dans la prise en charge d'une stomie. <http://www.shadowbuddies.org/>

<sup>1</sup>AFET, "Guide des bonnes pratiques en stomathérapie chez l'enfant, 2003"