



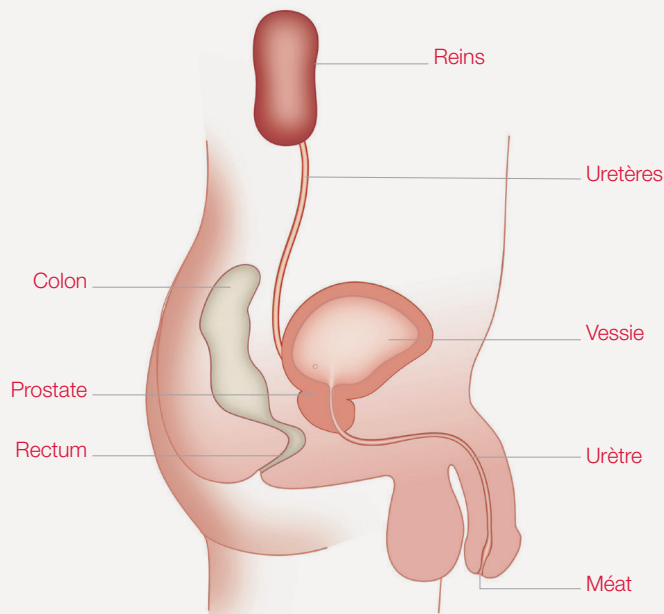

# Sondes pour sondage intermittent

Guide utilisateur hommes

# L'appareil urinaire

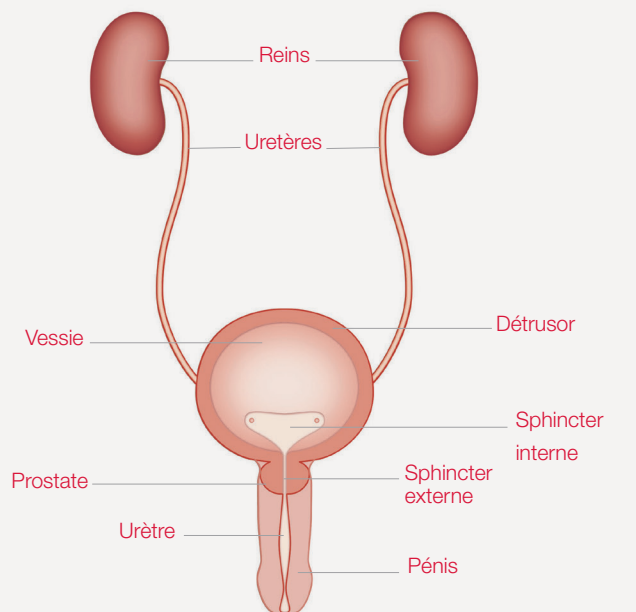

## Bien choisir sa sonde



Le sondage urinaire intermittent consiste à insérer une sonde (petit tuyau souple) dans la vessie pour la vider de son contenu lorsqu'elle ne se vide pas naturellement.

La sonde est retirée dès que la vessie est vide, elle est à usage unique et doit être jetée à la poubelle après utilisation. Vous pouvez recevoir gratuitement des sacs poubelles pour jeter vos sondes.

L'unité de mesure utilisée pour déterminer le diamètre extérieur de la sonde est la charrière (Ch).

Votre professionnel de santé vous prescrira la charrière la mieux adaptée à votre morphologie.

Hollister propose une large gamme de sondes prêtes à l'emploi offrant des caractéristiques qui permettent d'avoir une « **technique No Touch \*** »

L'ergonomie est au cœur du développement des sondes Hollister pour vous offrir un équilibre entre sécurité et facilité d'utilisation.

Lorsque les toilettes ne sont pas accessibles ou que vous devez collecter et mesurer le volume de vos urines, vous pouvez raccorder votre sonde à une poche de recueil, ou utiliser un set de sondage avec poche de recueil intégrée.

### Poche de recueil Stérile

Tubulure fine de 100 cm

**Hollister 2000**

Boîte de 30 poches stériles

Réf.	Code GTIN 13
9432	0610075081141



### Poche de recueil Non stérile

Tubulure fine de 90 cm

**Hollister 2000 NST**

Boîte de 30 poches non stériles

Réf.	Code GTIN 13
9430	5390166167026



\*No Touch = sans contact (qui permet de se sonder sans toucher le corps de la sonde avec les mains).

## Sonde VaPro™

Boîte de 30 sondes hydrophiles

Réf.	Charrière	Code GTIN 13
Longueur 40 cm Embout Nelaton (droit)		
72084	● Ch 8	0610075092611
72104	● Ch 10	0610075092628
72124	○ Ch 12	0610075092635
72144	● Ch 14	0610075092642
72164	● Ch 16	0610075092659
Longueur 40 cm Embout Tiemann (béquillé)		
73124	○ Ch 12	0610075161683
73144	● Ch 14	0610075161690
73164	● Ch 16	0610075161706
Longueur 20 cm Embout Nelaton (droit)		
72082	● Ch 8	0610075091928
72102	● Ch 10	0610075092581
72122	○ Ch 12	0610075092598
72142	● Ch 14	0610075092604



## Sonde VaPro™ F-Style

Boîte de 30 sondes hydrophiles, plus rigides que VaPro™

Réf.	Charrière	Code GTIN 13
Longueur 40 cm Embout Nelaton (droit)		
7600084	● Ch 8	0610075092666
7600104	● Ch 10	0610075092673
7600124	○ Ch 12	0610075092680
7600144	● Ch 14	0610075092697
7600164	● Ch 16	0610075092703




# La sonde VaPro™ et VaPro™ F-Style

Protection 100% No Touch\*<sup>6</sup>

### • Guide d'introduction protecteur

Barrière de protection contre les agents uro-pathogènes<sup>3</sup>

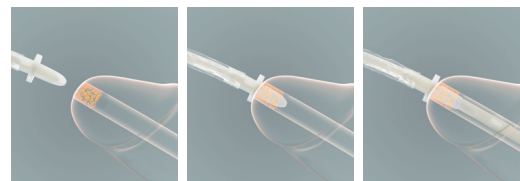

### • Œillets arrondis et lisses

Conçus pour assurer une vidange complète et douce de la vessie



### • Sonde protégée<sup>6</sup> sur toute sa longueur par la gaine et le guide

### • Confortable

La Technologie de lubrification HydraBalance™ confère glisse et douceur à l'insertion et au retrait<sup>7</sup> et ne tâche pas<sup>8</sup>



### • Prête à l'emploi dès l'ouverture de l'emballage

\*No touch = sans contact

La sonde VaPro existe en version Pocket : voir VaPro Pocket en page 16

Les sondes VaPro et VaPro F-Style existent en sets de sondage, avec poche intégrée : voir les sets de sondage VaPro Plus et VaPro Plus F-Style en page 12


**3.** Etude laboratoire, C1147 iFyber Hollister Touch Transfer Report, iFyber Hollister Touch [ref-02542], 2021. Le transfert microbien moyen était de 0,0031 % / 30 UFC pour VaPro 2, sur l'ensemble des 3 espèces testées. Intervalles de confiance à 95 % ( $\alpha = 0,05$ ) **4.** Evaluation en laboratoire du flux de sédimants et de mucus à travers les sondes pour sondage intermittent, 2023 – abstract présenté au BAUN 2023 (Hollister, data on file, TR-00708). **5.** Design validation: Protocol 5872-1. VaProTM 2 Phase 2 (Part 1); p.5. **6.** Etude clinique C.J. Bennett, M.N. Young, Salman S. M I, R. Adkins, F. Diaz and A. McCrary, The Journal of Urology, 1997, Vol. 158, p. 519-521. **7.** Hollister Document: Technical Report TR-00643 (2023); b. Section 3.6, Figure 3.4, Section 3.3.1, Section 3.8.5 (Dry Out / Minimising Risks) Section 3.4 (CoF Data) Section 3.7 (Clinical Evaluation: Ease of Use). **8.** Test laboratoire: Lab Notebook OS 61229, p.4. Polyester, coton, lin et denim.



# Mode d'emploi de la sonde Vapro™



1. Préparez votre matériel.
2. Lavez-vous les mains comme vous l'a conseillé votre professionnel de santé.
3. Installez-vous dans une position pratique pour pouvoir vous sonder. Enlevez vos vêtements pour accéder à vos parties génitales.
- 4a. Ouvrez l'emballage en insérant votre doigt dans le trou et en tirant sur le fil d'ouverture vers le bas (comme indiqué par la flèche).

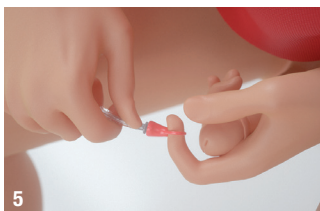

- 4b. Retirez la sonde de son emballage. Laissez la sonde reposer sur un genou, évier ou tout autre surface plane.
5. Tenez votre pénis et décalottez votre prépuce (si vous n'êtes pas circoncis). Retirez le capuchon rouge.



6. Maintenez la sonde d'une main et avec l'autre main, faites avancer la sonde dans le guide en veillant à ce que celle-ci n'en sorte pas.
7. Attraper la sonde par les ailettes du guide protecteur. Pincez le bout de la verge pour ouvrir le méat. Insérez le guide protecteur puis faites progresser la sonde dans l'urètre jusqu'à la vessie (vous saurez que vous y êtes quand l'urine commencera à s'écouler).



8. Abaissez la verge si vous sentez une butée. Retirez la sonde lentement pour une bonne vidange de la vessie.
9. Vous avez la possibilité de remettre votre sonde VaPro à l'intérieur de l'emballage pour le jeter en toute discrétion. Jetez votre sonde dans un endroit approprié.
10. Lavez-vous les mains.

**STOCKAGE** : À conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Conservez les boîtes à l'horizontale. En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service client Hollister au 0800 94 36 14 ou par e-mail à [assistance.conseil@hollister.com](mailto:assistance.conseil@hollister.com)

**AVERTISSEMENTS** : Ne pas utiliser si le packaging est ouvert ou endommagé. Ne pas réutiliser. Si un inconfort ou un signe de traumatisme apparaît, cesser d'utiliser ce produit et consulter rapidement un professionnel de santé. Cette sonde pour sondage intermittent est un tube flexible qui est inséré dans l'urètre par les patients hommes ayant besoin de vider l'urine présente dans leur vessie. Afin de réduire le risque d'infection et/ou de complication, ne pas réutiliser la sonde.

Le sondage doit être effectué selon les recommandations d'un soignant et conformément au mode d'emploi fourni. La fréquence de sondage varie selon les personnes. Elle doit donc être indiquée par un professionnel de santé.

Pour toute autre question relative à votre sondage, veuillez contacter votre professionnel de santé.

**PRECAUTIONS** : Les situations suivantes nécessitent l'avis d'un professionnel de santé avant de se sonder avec la sonde VaPro ou VaPro F-Style : Lésions de l'urètre, Saignement inexplicable de l'urètre, Sténose prononcée de l'urètre, « Fausse route », Urétrite : inflammation de l'urètre, Prostatite : inflammation de la prostate, Epididymite : inflammation de l'épididyme (canal du testicule)



Sonde Onli™

Boîte de 30 sondes hydrophiles rigides

Réf.	Charrière	Code GTIN 13
Longueur 40 cm Embout Nelaton (droit)		
82084	● Ch 8	0610075072408
82104	● Ch 10	0610075072415
82124	○ Ch 12	0610075072422
82144	● Ch 14	0610075072439
82164	● Ch 16	0610075072446



La sonde Onli™ 1,2

Simplicité



• Godet souple pour contrôler le flux d'urine

Et permettre la connexion à une poche de recueil

• Manipulation facile

Le manchon coloré, souple et strié, permet la manipulation de la sonde sans contact avec les mains

• Rigide et transparente

Aide à insérer et faire progresser la sonde et permet la visualisation de l'écoulement

• Confortable

La Technologie de lubrification HydraBalance™ confère glisse et douceur à l'insertion et au retrait<sup>1</sup> et ne tâche pas<sup>2</sup>



• Prête à l'emploi dès l'ouverture de l'emballage

1. Hollister Document: Technical Report TR-00643 (2023); b. Section 3.6, Figure 3.4, Section 3.3.1, Section 3.8.5 (Dry Out / Minimising Risks) Section 3.4 (CoF Data) Section 3.7 (Clinical Evaluation: Ease of Use)  
2. Test laboratoire: Lab Notebook OS 61229, p.4. Polyester, coton, lin et denim.


# Mode d'emploi de la sonde Onli™



1. Lavez-vous les mains. Installez-vous dans une position pratique pour pouvoir vous sonder et enlevez vos vêtements pour accéder à votre pénis.
2. Utilisez un savon doux et non parfumé ou une lingette sans alcool pour nettoyer le gland et le méat, uniquement si cela vous a été conseillé par votre professionnel de santé.




3. À l'aide des œillets pour les doigts, ouvrez l'emballage jusqu'à ce que le godet de la sonde et le manchon bleu soient visibles.
4. Retirez la sonde du sachet en tenant la sonde par son godet ou manchon bleu. Décalottez le gland si le prépuce est présent.

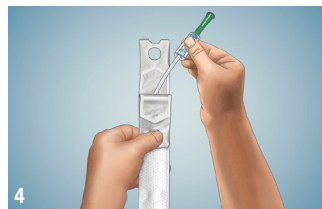

- 5a. Maintenez d'une main le pénis tendu à l'horizontale. De l'autre main, tenez fermement la sonde en pinçant le manchon bleu que vous ferez coulisser le long de la sonde pour pouvoir insérer la sonde dans l'urètre. Relâchez légèrement le manchon et faites-le glisser vers le godet. Maintenez ensuite fermement le manchon pour faire avancer la sonde. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'urine commence à couler.



- 5b. Autre option : Maintenez d'une main le pénis tendu à l'horizontale. De l'autre main, tenez fermement la sonde en pinçant le manchon bleu et insérez la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à couler. Relâchez le prépuce, s'il y a lieu.

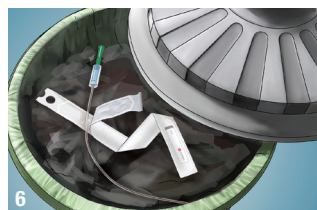

6. Une fois le flux urinaire arrêté, retirez lentement la sonde. Si l'urine s'écoule à nouveau, arrêtez le geste jusqu'à ce que le flux cesse. Une fois que vous êtes sûr que la vessie est vide, retirez complètement la sonde. Jetez la sonde à la poubelle, PAS DANS LES TOILETTES.
7. Lavez-vous les mains.



Flashez ce QR code pour accéder à la vidéo mode d'emploi

**STOCKAGE** : À conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Conservez les boîtes à l'horizontale. En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service client Hollister au 0800 94 36 14 ou par e-mail à [assistance.conseil@hollister.com](mailto:assistance.conseil@hollister.com)

**AVERTISSEMENTS** : Ne pas utiliser si le packaging est ouvert ou endommagé. Ne pas réutiliser. Si un inconfort ou un signe de traumatisme apparaît, cesser d'utiliser ce produit et consulter rapidement un professionnel de santé. Cette sonde pour sondage intermittent est un tube flexible qui est inséré dans l'urètre par les patients hommes ayant besoin de vider l'urine présente dans leur vessie. Afin de réduire le risque d'infection et/ou de complication, ne pas réutiliser la sonde.

Le sondage doit être effectué selon les recommandations d'un soignant et conformément au mode d'emploi fourni. La fréquence de sondage varie selon les personnes. Elle doit donc être indiquée par un professionnel de santé.

Pour toute autre question relative à votre sondage, veuillez contacter votre professionnel de santé.

**PRECAUTIONS** : Les situations suivantes nécessitent l'avis d'un professionnel de santé avant de se sonder avec la sonde Onli : Lésions de l'urètre, Saignement inexplicable de l'urètre, Sténose prononcée de l'urètre, « Fausse route », Urétrite : inflammation de l'urètre, Prostatite : inflammation de la prostate, Epididymite : inflammation de l'épididyme (canal du testicule)

## Set de sondage VaPro Plus™

Boîte de 30 sondes hydrophiles avec poche préconnectée

Réf.	Charrière	Code GTIN 13
Longueur 40 cm Embout Nelaton (droit)		
74124	○ Ch 12	0610075092734
74144	● Ch 14	0610075092741
Longueur 20 cm Embout Nelaton (droit)		
74122	○ Ch 12	0610075092710
74142	● Ch 14	0610075092727



## Set de sondage VaPro Plus™ F-Style

Boîte de 30 sondes hydrophiles, plus rigides que VaPro Plus™, avec poche pré-connectée

Réf.	Charrière	Code GTIN 13
Longueur 40 cm Embout Nelaton (droit)		
7700124	○ Ch 12	0610075092758
7700144	● Ch 14	0610075092765



# Le set de sondage VaPro Plus™ et VaPro Plus F-Style™

Avec poche de recueil intégrée

### • Poche ergonomique

1. Jonction mobile pour disposer la poche avec l'inclinaison souhaitée
2. Valve anti-reflux
3. Grande poignée de préhension pour une manipulation facilitée
4. 2 anneaux de préhension et ouverture prédécoupée pour une vidange simplifiée

### • Mesure optimisée de l'urine

5. Graduations claires par 100ml jusqu'à 1L

### • Une poche de recueil facile à ouvrir et à vider<sup>1</sup>



Le set de sondage VaPro Plus existe en version Pocket : voir VaPro Plus Pocket en page 16

Les sets de sondage VaPro Plus et VaPro Plus F-Style existent en sondes simples, sans poche intégrés : voir les sondes VaPro et VaPro F-Style en page 4

1. User survey: Protocol 5872-1 VaPro™ 2, Phase 2 (Part 2); p.3

# Mode d'emploi du set de sondage VaPro Plus



1. Préparez votre matériel.
2. Lavez-vous les mains comme vous l'a conseillé votre professionnel de santé.
3. Installez-vous dans une position pratique pour pouvoir vous sonder. Enlevez vos vêtements pour accéder à vos parties génitales.
4. Ouvrez l'emballage en insérant votre doigt dans le trou et en tirant sur le fil d'ouverture vers le bas (comme indiqué par la flèche). Retirez la sonde de son emballage.



5. Pour déplier la poche de recueil, faites glisser la bande papier vers l'extérieur ou déchirez-la. Laissez la sonde reposer sur un genou, évier ou tout autre surface plane.
6. Tenez votre pénis et décalottez votre prépuce (si vous n'êtes pas circoncis). Retirez le capuchon rouge.



7. Maintenez la sonde d'une main et avec l'autre main, faites avancer la sonde dans le guide en veillant à ce que celle-ci n'en sorte pas.
8. Attraper la sonde par les ailettes du guide protecteur. Pincez le bout de la verge pour ouvrir le méat. Insérez le guide protecteur puis faites progresser la sonde dans l'urètre jusqu'à la vessie (vous saurez que vous y êtes quand l'urine commencera à s'écouler).



9. Abaissez la verge si vous sentez une butée. Retirez la sonde lentement pour une bonne vidange de la vessie.
10. Vous disposez d'une encoche pré-découpée sur la poche de recueil pour vider les urines dans les toilettes ou dans un dispositif de recueil approprié.



11. Vous avez la possibilité de remettre votre sonde VaPro Plus à l'intérieur de l'emballage pour le jeter en toute discrétion. Jetez votre sonde dans un endroit approprié.
12. Lavez-vous les mains pour finir.

**STOCKAGE** : À conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Conservez les boîtes à l'horizontale. En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service client Hollister au 0800 94 36 14 ou par e-mail à [assistance.conseil@hollister.com](mailto:assistance.conseil@hollister.com)

**AVERTISSEMENTS** : Ne pas utiliser si le packaging est ouvert ou endommagé. Ne pas réutiliser. Si un inconfort ou un signe de traumatisme apparaît, cesser d'utiliser ce produit et consulter rapidement un professionnel de santé. Cette sonde pour sondage intermittent est un tube flexible qui est inséré dans l'urètre par les patients hommes ayant besoin de vider l'urine présente dans leur vessie. Afin de réduire le risque d'infection et/ou de complication, ne pas réutiliser la sonde.

Le sondage doit être effectué selon les recommandations d'un soignant et conformément au mode d'emploi fourni. La fréquence de sondage varie selon les personnes. Elle doit donc être indiquée par un professionnel de santé.

Pour toute autre question relative à votre sondage, veuillez contacter votre professionnel de santé.

**PRECAUTIONS** : Les situations suivantes nécessitent l'avis d'un professionnel de santé avant de se sonder avec le set de sondage VaPro Plus ou VaPro Plus F-Style : Lésions de l'urètre, Saignement inexpliqué de l'urètre, Sténose prononcée de l'urètre, « Fausse route », Urétrite : inflammation de l'urètre, Prostatite : inflammation de la prostate, Epididymite : inflammation de l'épididyme (canal du testicule)



Flashez ce QR code pour regarder la vidéo utilisateur du même set, en version pocket



## Set de sondage VaPro Plus Pocket™

Boîte de 30 sondes hydrophiles avec poche préconnectée, dans un emballage compact

Réf.	Charrière	Code GTIN 13
Longueur 40 cm Embout Nélaton (droit)		
71084	● Ch 8	0610075094431
71104	● Ch 10	0610075094448
71124	○ Ch 12	0610075094462
71144	● Ch 14	0610075094479
71164	● Ch 16	0610075094486
Longueur 20 cm Embout Nélaton (droit)		
71082	● Ch 8	0610075094387
71102	● Ch 10	0610075094394
71122	○ Ch 12	0610075094400
71142	● Ch 14	0610075094424



## Sonde VaPro Pocket™

Boîte de 30 sondes hydrophiles dans un emballage compact

Réf.	Charrière	Code GTIN 13
Longueur 40 cm Embout Nélaton (droit)		
70104	● Ch 10	0610075093052
70124	○ Ch 12	0610075093069
70144	● Ch 14	0610075093076
70164	● Ch 16	0610075093083



# La sonde VaPro Pocket™ et le set de sondage VaPro Plus Pocket™

## Discrétion<sup>1,2</sup>

- **Facile à emporter**  
pour un sondage discret dans tous vos déplacements<sup>2</sup>
- **Emballage en format poche**
- **Sonde flexible et conception d'emballage discrète<sup>1,2</sup>**



**Se glisse facilement dans votre poche**

1. Etude clinique: Protocol 4850-I VaPro Pocket Male User Assessment, p.21-22  
2. User survey: LV-05758R, p.6

# Mode d'emploi du set de sondage VaPro Plus Pocket



1. Préparez votre matériel.
2. Lavez-vous les mains comme vous l'a conseillé votre professionnel de santé.
3. Installez-vous dans une position pratique pour pouvoir vous sonder. Enlevez vos vêtements pour accéder à vos parties génitales.



- 4a. Ouvrez l'emballage en insérant votre doigt dans le trou et en tirant sur le fil d'ouverture vers le bas (comme indiqué par la flèche).
- 4b. Retirez la sonde de son emballage.



5. Pour déplier la poche de recueil, faites glisser la bande papier vers l'extérieur ou déchirez-la. Laissez la sonde reposer sur un genou, évier ou tout autre surface plane.
6. Tenez votre pénis et décalottez votre prépuce (si vous n'êtes pas circoncis). Retirez le capuchon rouge.

**STOCKAGE :** À conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne pas congeler. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Conservez les boîtes à l'horizontale. En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service client Hollister au 0800 94 36 14 ou par e-mail à [assistance.conseil@hollister.com](mailto:assistance.conseil@hollister.com)

**AVERTISSEMENTS :** Ne pas utiliser si le packaging est ouvert ou endommagé. Ne pas réutiliser. Si un inconfort ou un signe de traumatisme apparaît, cesser d'utiliser ce produit et consulter rapidement un professionnel de santé. Cette sonde pour sondage intermittent est un tube flexible qui est inséré dans l'urètre par les patients hommes ayant besoin de vider l'urine présente dans leur vessie. Afin de réduire le risque d'infection et/ou de complication, ne pas réutiliser la sonde.



7. Maintenez la sonde d'une main et avec l'autre main, faites avancer la sonde dans le guide en veillant à ce que celle-ci n'en sorte pas.
8. Attraper la sonde par les ailettes du guide protecteur. Pincez le bout de la verge pour ouvrir le méat. Insérez le guide puis faites progresser la sonde dans l'urètre jusqu'à la vessie (vous saurez que vous y êtes quand l'urine commencera à s'écouler).



9. Abaissez la verge si vous sentez une butée. Retirez la sonde lentement pour une bonne vidange de la vessie.
10. Vous disposez d'une encoche pré-découpée sur la poche de recueil pour vider les urines dans les toilettes ou dans un dispositif de recueil approprié.



11. Vous avez la possibilité de remettre votre sonde VaPro Plus Pocket à l'intérieur de l'emballage pour le jeter en toute discrétion. Jetez votre sonde dans un endroit approprié.
12. Lavez-vous les mains pour finir.



Flashez ce QR code  
pour regarder la  
vidéo utilisateur

Le sondage doit être effectué selon les recommandations d'un soignant et conformément au mode d'emploi fourni. La fréquence de sondage varie selon les personnes. Elle doit donc être indiquée par un professionnel de santé.

Pour toute autre question relative à votre sondage, veuillez contacter votre professionnel de santé.

**PRECAUTIONS :** Les situations suivantes nécessitent l'avis d'un professionnel de santé avant de se sonder avec le set de sondage VaPro Plus Pocket : Lésions de l'urètre, Saignement inexpliqué de l'urètre, Sténose prononcée de l'urètre, « Fausse route », Urétrite : inflammation de l'urètre, Prostatite : inflammation de la prostate, Epididymite : inflammation de l'épididyme (canal du testicule)





Jonny et Katie utilisent des sondes Hollister avec Technologie de lubrification HydraBalance™



HydraBalance™  
Lubricating Technology

## Technologie de lubrification HydraBalance™ pour une expérience de sondage aisée

### Principales caractéristiques de notre technologie de lubrification HydraBalance™



Douceur et confort à l'insertion et au retrait de la sonde <sup>1</sup>



Aide à protéger l'urètre d'éventuels micro-trauma, facteurs chroniques d'infections des voies urinaires <sup>2</sup>



Conçu pour avoir un équilibre entre des ingrédients naturels, pour apporter une expérience de sondage la plus aisée possible <sup>3</sup>

### Notre engagement pour la planète



Emballage et sonde sans PVC, sans latex, ni phtalate (DEHP)

1. Hollister Document: Technical Report TR-00643 (2023); b. Section 3.6, Figure 3.4, Section 3.3.1, Section 3.8.5 (Dry Out / Minimising Risks) Section 3.4 (CoF Data) Section 3.7 (Clinical Evaluation: Ease of Use).
2. European Association of Urology Nurses (EAUN), Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care – Catheterisation, Urethral Intermittent in Adults Dilatation, urethral intermittent in adults (2013), pages 25, 33, 47.
3. Lundgren, J.; Bengtsson, O.; Israelsson, A.; Jönsson, A.C.; Lindh, A.S.; Utas, J.; Spinal Cord 2000, 38(1), 45-50 - The importance of osmolality for intermittent catheterization of the urethra.

*Vous utilisez des sondes urinaires pour sondage intermittent ?*

Des services gratuits  
qui facilitent  
le retour à la maison  
& vos déplacements.



Se sentir  
écouté,  
ça change  
tout !

Un service d'écoute  
& d'expertise produit  
personnalisé

☎ 0 800 479 267

Services & appels  
gratuits

Des  
conférences  
en ligne

Sur des sujets  
tels que :

- les sondes urinaires
- l'ergonomie
- la sexualité
- ...



Des outils  
gratuits  
& pratiques



Les incontournables  
du sondage  
intermittent

Le kit, le pass voyage  
& la carte d'accès aux  
toilettes, le sac à dos,  
la trousse homme

Actus,  
& salons !



*Je m'inscris ici et  
c'est gratuit !*

[www.vivreplushollister.com](http://www.vivreplushollister.com)

L'adhésion aux services Vivre+ est réservée aux utilisateurs de sondes urinaires pour sondage intermittent et leurs proches. Offre limitée à une inscription par personne (même nom, même adresse) en France métropolitaine.





## Assistance Conseil



Service & appel gratuits

0 800 479 267

du lundi au vendredi de 10h à 12h et  
de 14h à 17h30 (16h40 le vendredi)



[assistance.conseil@hollister.com](mailto:assistance.conseil@hollister.com)

La Gamme des sondes Hollister est constituée de dispositifs médicaux destinés au sondage urinaire intermittent : Onli™, VaPro™, VaPro™ F-style, VaPro Pocket™, VaPro Plus™, VaPro Plus™ F-style, VaPro Plus Pocket™.

Il s'agit de dispositifs tubulaires souples qui sont insérés par l'urètre pour vidanger la vessie. Il s'agit de dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Hollister Incorporated. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementée qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Ce matériel s'utilise sur ordonnance et selon les conseils d'un professionnel de santé. Consultez attentivement les instructions figurant sur les notices et/ou les étiquetages et consultez un professionnel de santé pour un diagnostic médical.

### Hollister France Inc

402 202 733 RCS Nanterre

Tour Franklin 100/101

Terrasse Boieldieu

92042 Paris La Défense

Hollister, le logo Hollister, HydraBalance™ et son logo, Onli™, VaPro™, VaPro Pocket™, VaPro Plus™, VaPro Plus Pocket™ sont des marques déposées de Hollister Incorporated. Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2025 Hollister ULC. Edition Décembre 2025 - 15000258 - FR-00431

